



Mundschutzmaske wiederverwendbar

Unsteril, kein Medizinprodukt

Für Allergiker geeignet

Medizinisch auf Schadstoffe getestet

Gebrauchsanleitung

- Schutzmaske vor dem ersten Gebrauch waschen
- Maske richtig platzieren, Mund und Nase müssen vollständig abgedeckt sein
- Gesichts- oder Augenkontakt beim Auf- und Absetzen mit den Händen vermeiden
- Mit den Bändern fixieren und hinter dem Kopf fest binden
- Tragedauer ca. 4 Stunden, dann gegen frische Maske tauschen

- Benutzte Atemschutzmasken
umgehend hygienisch
waschen (min. 60°C)



Viren werden bereits ab 60° Grad abgetötet.

Alternative Möglichkeiten der Desinfektion:

- Mikrowelle auf höchster Stufe für 1 Minute
- Einlage in sehr heißes Wasser für 10 Minuten
- Einlage im Backofen bei 80°C für 30 Minuten

- Bitte vor und nach dem Aufsetzen der Schutzmaske Hände waschen / desinfizieren
- Von Kindern unter 6 Jahren fernhalten
- Rückgaberecht aus Hygieneschutz nur bei ungeöffneter Packung / Hygienesiegel



ÖKO Planet GmbH
Frohnradstr. 16
63768 Hösbach
Tel. +49 (0)6021 62994-0